


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Azienda Sanitaria Provinciale Enna</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LIQUIDI CAVITARI</b></p> <p style="text-align: center;">MOD05/DIPS/PATC/PG002</p> | <p style="text-align: center;">v. 0.0</p> <p style="text-align: center;">20/10/2021</p> <p style="text-align: center;">Pagina 1 di 1</p> |
|---|--|--|

**LIQUIDI CAVITARI DA SITI STERILI** (Pleurico, Pericardico, Peritoneale, Ascitico, Sinoviale/Articolare, Amniotico)

**MATERIALE PER LA RACCOLTA** Siringa sterile da 5-10 ml. Provetta sterile con tappo rosso.

**MODALITA' DI PRELIEVO** Rispettare rigorosamente le norme di asepsi, disinfettare la cute e lasciare agire il disinfettante per il tempo indicato dalla scheda tecnica, prelevare con siringa sterile quantità non inferiori ad 1-2 ml di liquido, eliminare completamente dalla siringa le bolle d'aria, trasferire il contenuto nella provetta/contenitore sterile con tappo rosso.

**INVIO E CONSERVAZIONE** Consegnare il campione al laboratorio, non è ammessa la conservazione.