

	<p style="text-align: center;"><b>Azienda Sanitaria Provinciale Enna</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PUNTA CATETERI</b></p> <p style="text-align: center;">MOD15/DIPS/PATC/PG002</p>	<p style="text-align: center;">v. 0.0</p> <p style="text-align: center;">20/10/2021</p> <p style="text-align: center;">Pagina 1 di 1</p>
---	--	--

Coltura batteri aerobi e lieviti

**MATERIALE PER LA RACCOLTA** Provetta sterile con tappo a vite.

**MODALITA' DI PRELIEVO** Indossare guanti sterili Disinfettare la cute attorno al catetere Rimuovere il catetere evitando di contaminarlo toccando superfici non sterili Utilizzando forbici sterili, tagliare la punta del catetere della lunghezza massima di 5 cm (tecnica di Cleri); cateteri più lunghi verranno considerati non idonei. Inserire la punta nella provetta sterile ed umidificare con alcune gocce di soluzione fisiologica sterile.

**INVIO E CONSERVAZIONE** Consegnare il campione al Laboratorio rispettando gli orari di consegna. E' possibile conservare il materiale in frigorifero fino 24 ore.